

DEX™

A WIRELESS WORLD

BRUGSANVISNING

RC-DEX FJERNBETJENING

INDHOLD

DIN NYE DEX™ FJERNBETJENING	4
TILBEHØR	7
BATTERIINFORMATION	8
UDSKIFTNING AF BATTERI	9
ANVENDELSE AF FJERNBETJENINGEN	11
SENDERÆKKEVIDDE.....	11
LYSDIODE.....	11
JUSTERING AF LYDSTYRKEN	12
SKIFT PROGRAM	13
VEDLIGEHODELSE AF FJERNBETJENINGEN	14
ADVARSLER	15
FEJLFINDING	17
REGULATORISK INFORMATION	18
SYMBOLER	22


DIN NYE DEX™ FJERNBETJENING

Vi håber, du bliver tilfreds med din nye fjernbetjening til Widex høreapparater. Denne brugsanvisning forklarer, hvordan fjernbetjeningen skal betjenes. For at få det optimale udbytte af fjernbetjeningen anbefaler vi, at du læser hele brugsanvisningen igennem inden ibrugtagning.

Fjernbetjeningen giver nem adgang til høreapparatfunktioner som lydstyrkeregulering og programskift. Den er også udstyret med en lysdiode til visuel indikation.

FORSIDE


1. Lysdiode
2. Lydstyrke op
3. Programskift
4. Lydstyrke ned

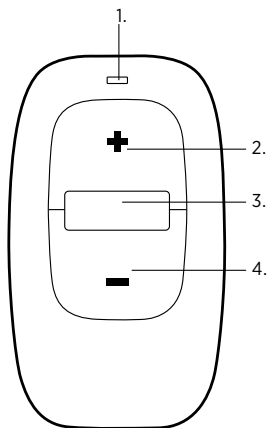

BAGSIDE




1. Batteridæksel

2. Fastgørelsesøje

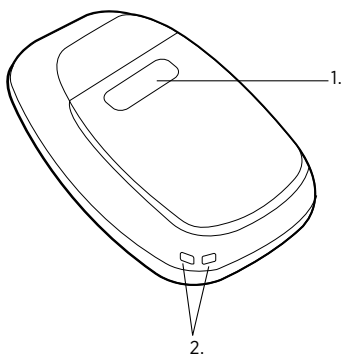

TILBEHØR

1. Batteri
2. Nøglering/snor
3. Brugsanvisning

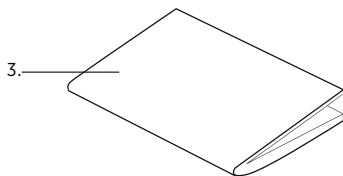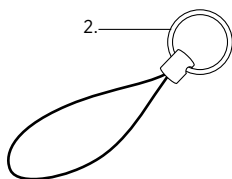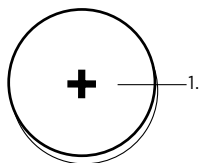

BATTERIINFORMATION

Batteritype til denne fjernbetjening er:


Lithium CR2032

På klinikken kan du få oplysninger om anskaffelse af batterier. Bemærk, at der på emballagen findes en datomarkering, som angiver, hvor længe batterierne kan holde, og anbefalinger om, hvordan batterierne skal kasseres efter brug.



Fjernbetjeningen er tændt, når et fungerende batteri er korrekt placeret i batterikammeret. Batterilevetiden er op til 2 år, afhængigt af hvor ofte fjernbetjeningens taster aktiveres.

UDSKIFTNING AF BATTERI

1. Skub batteridækslet nedad for at tage det af.
2. Tryk på batteriet, som vist på tegningen, for at vippe det op og tage det ud.

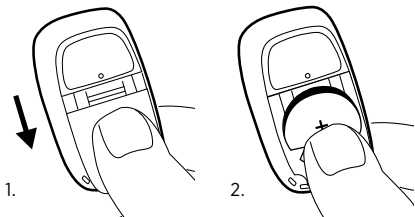

3. Isæt det nye batteri i en skæv vinkel, som vist på tegningen, og tryk derefter på batteriet for at klikke det på plads. Plus-tegnet (+) på batteriet skal vende opad
4. Sæt batteridækslet på plads

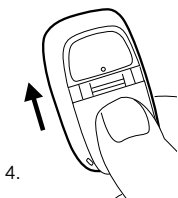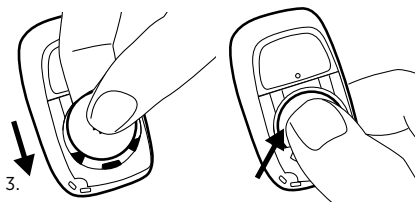

ANVENDELSE AF FJERNBETJENINGEN

Fjernbetjeningen giver dig mulighed for at betjene høreapparatet diskret, f.eks. fra en lomme eller en taske. Fjernbetjeningen er udstyret med et øje til fastgørelse af en nøglering eller lignende.

SENDERÆKKEVIDDE

Senderækkevidden fra fjernbetjening til høreapparat er 1,0 m.

LYSDIODE

Et grønt lys i dioden angiver, at en af tasterne på fjernbetjeningen er blevet aktiveret.

JUSTERING AF LYDSTYRKEN

Tryk kort på tasten til lydstyrke op (+) for at øge lydstyrken. Tryk kort på tasten til lydstyrke ned (-) for at sænke lydstyrken.

Når du aktiverer volumentasterne, kommer der en kort biptone. Når du har nået det højeste eller laveste justeringsniveau, kommer der en lang biptone.

SKIFT PROGRAM

Du kan bruge fjernbetjeningen til at vælge mellem en række lytteprogrammer, afhængigt af hvor mange programmer dit høreapparat er blevet programmeret med. Tryk kort på tasten til programskift for at skifte lytteprogram.

Zen+

Hvis dit høreapparat er programmeret med et specielt Zen+-program, kan du få adgang hertil ved et langt tryk (2 sek.) på tasten til programskift. Ved hjælp af korte tryk på programskiftnappen kan du vælge mellem de tilgængelige Zen-lydstile. Et langt tastetryk bringer dig tilbage til standardlytteprogrammet.

VEDLIGEHOVELSE AF FJERNBETJENINGEN

Fjernbetjeningen skal behandles forsigtigt og omhyggeligt. Her er et par gode råd, som kan forlænge fjernbetjeningens levetid:

- Fjernbetjeningen må ikke udsættes for kraftig varme/kulde eller høj fugtighed.
- Fjernbetjeningen rengøres med en blød klud. Brug aldrig vand eller rengøringsmidler.
- Hvis du skal under røntgen, scanning eller anden strålebehandling, må fjernbetjeningen ikke medbringes. Anbring heller aldrig fjernbetjeningen i en mikrobølgeovn. Sådanne former for stråling kan ødelægge fjernbetjeningen. Den stråling, der kan komme fra f.eks. overvågningssystemer, tyverialarmer og mobiltelefoner, er derimod svage og vil ikke skade fjernbetjeningen.
- Forsøg aldrig selv at åbne eller reparere fjernbetjeningen. (Må kun udføres af autoriseret personale).

ADVARSLER

Batterier kan være farlige, hvis de sluges eller anvendes fejlagtigt. Hvis man sluger et batteri eller anvender det fejlagtigt, kan man komme meget alvorligt og muligvis livsfarligt til skade. Er skaden sket, bør du straks kontakte en læge.

- Sørg for at holde fjernbetjeningen og dens dele, tilbehør og batterier uden for børns og andres rækkevidde, som kan risikere at sluge dem eller på anden måde komme til skade. Skift ikke batterier for øjnene af dem, og lad dem ikke se, hvor du opbevarer dine batterier. Kassér brugte batterier med omhu.
- Put aldrig batterier i munden, da du kan risikere at sluge dem.
- Brug ikke fjernbetjeningen i flyvemaskiner eller på hospitaler uden tilladelse.
- Brug ikke fjernbetjeningen i miner eller andre områder med eksplosive luftarter.

- Selvom fjernbetjeningen er designet til at opfylde de skrappeste internationale EMC-standarder (elektromagnetisk kompatibilitet), kan man ikke udelukke den mulighed, at den kan forårsage interferens med andet udstyr, som f.eks. medicinsk udstyr.

ADVARSEL

Eksplodingsrisiko, hvis batteriet udskiftes med en batteritype, der er ukorrekt eller genopladelig.

Kassér brugte batterier i overensstemmelse med vejledningen.

FEJLFINDING

Problem	Mulig årsag	Løsning
Fjernbetjeningen virker ikke	Batteriet er fladt/ virker ikke	Skift batteri
	Batteriet i høreapparatet er brugt op.	Skift batteri
	Uden for rækkevidde	Flyt inden for rækkevidde

REGULATORISK INFORMATION



Undertegnede Widex A/S erklærer herved, at følgende udstyr D-FS overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

En kopi af Overensstemmelseserklæringen kan findes under: <http://www.widex.com/doc>



Følgende afsnit er på engelsk og kan evt. benyttes i forbindelse med problemer, der er opstået, når fjernbetjeningen benyttes i udlandet.

Federal Communications Commission and Industry Canada Statement

FCC ID: TTY-RCDEX

IC: 5676B-RCDEX

This device complies with part 15 of the FCC Rules and with RSS-210 of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off

and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This equipment complies with the Industry Canada RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment as per IC RSS-102 Issue 3.

Changes or modifications to the equipment not expressly approved by Widex could void the user's authority to operate the equipment.










Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, som kan være potentielt farlige og udgøre en risiko for menneskers sundhed og for miljøet, hvis elektronikaffald (WEEE) ikke håndteres korrekt.








Høreapparater, tilbehør og batterier må ikke bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald.

Høreapparater, tilbehør og batterier skal bortskaffes på særlige affaldsstationer for elektronikaffald eller returneres til din høreklinik, som sørger for korrekt bortskaffelse. Korrekt bortskaffelse hjælper med at beskytte folkesundheden og miljøet.

SYMBOLER

Symboler, som ofte anvendes af Widex A/S på pakkematerialet (etiketter, brugsanvisninger mv.) til medicinsk udstyr

symbol	Titel/beskrivelse
	Producent Sammen med dette symbol angives navn og adresse på den producent, der har produceret produktet. Såfremt det er relevant, angives produktionsdatoen også.
	Produktionsdato Den dato, hvor produktet er produceret.
	Udløbsdato Produktet må ikke anvendes efter denne dato.
	Batchnummer Produktets batchnummer (identificering af batch)
	Katalognummer Produktets katalognummer (varenummer)
	Serienummer Produktets serienummer*
	Produktet skal beskyttes mod sollys Produktet skal beskyttes mod lyskilder og/eller produktet skal beskyttes mod varmekilder

symbol	Titel/beskrivelse
	Produktet skal holdes tørt Produktet skal beskyttes mod fugt og/eller produktet skal beskyttes mod regn
	Minimumtemperatur Den laveste temperatur, som produktet med sikkerhed kan tåle at blive udsat for.
	Maksimumtemperatur Den højeste temperatur, som produktet med sikkerhed kan tåle at blive udsat for.
	Temperaturforhold De højeste og laveste temperaturer, som produktet med sikkerhed kan tåle at blive udsat for.
	Se brugsanvisningen Brugsanvisningen indeholder vigtig sikkerhedsinformation (advarsler/forholdsregler) og skal læses, inden produktet tages i brug.
	Caution/Warning Tekst markeret med symbolet for advarsler og forholdsregler skal læses, inden produktet tages i brug.
	WEEE-mærke "Må ikke kasseres som almindeligt affald" Når produktet skal kasseres, skal det sendes til et autoriseret indsamlingssted for genbrug og genanvendelse af elektrisk og elektronisk udstyr.

symbol	Titel/beskrivelse
	CE-mærke Produktet overholder kravene i EU-direktiverne for CE-mærket udstyr.
	Bemærk Produktet klassificeres i henhold til R&TTE direktiv 1999/5/EF som Klasse 2 udstyr med visse anvendelsesbegrænsninger i nogle af EU- og EØS-landene.
	C-Tick mærke Produktet overholder de gældende regulatoriske krav til EMC og radiospektrum for produkter, som distribueres til Australien og New Zealand.
	Interference Elektromagnetisk interference kan forekomme i nærheden af produktet.

*Serienummeret er det 6- eller 7-cifrede nummer på produktet. Serienummeret kan være påtrykt uden foranstillet **SN**



WIDEX A/S Nymøllevej 6, 3540 Lyngbe, Denmark
www.widex.com

CE 0459

Manualnummer:
9 514 0128 010 #03



MIX
From responsible
sources
FSC® C068122