



RC3-1

**Brugsanvisning til
RC3-1 fjernbetjeningen**

I denne brugsanvisning kan fjernbetjeningen og andre dele se anderledes ud, end det du har. Desuden forbeholder vi os ret til ændringer.



Høreapparater og deres tilbehør må ikke bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald. Tal med Widex' distributør i dit land angående bortskaffelse af dit høreapparat.

Indhold

Tillykke med din RC3-1 fjernbetjening	4
RC3-1	6
Batteriinformation	8
Batteritype	8
Isætning af batteriet	9
Udskiftning af batteriet	9
Tænd og sluk	10
Udgangsstilling	10
Lydstyrken	11
Lydløs	14
Lytteprogrammerne	16
Korttidsanalyse	20
Vedligeholdelse	21
Gode råd	23
Hvis din RC3-1 fjernbetjening ikke virker	24
Ekstraudstyr	25
Regulatorisk overensstemmelse	27

Tillykke med din RC3-1 fjernbetjening


Du har valgt at anskaffe dig en fjernbetjening til dit Widex høreapparat. Tillykke med dit valg. Denne brugsanvisning indeholder information om, hvordan du betjener din fjernbetjening. Vi anbefaler, at du læser hele brugsanvisningen for at få det optimale udbytte af din nye RC3-1 fjernbetjening.

Din RC3-1 fjernbetjening er et hjælpemiddel til dit høreapparat. Du kan sagtens betjene dit høreapparat uden, men fjernbetjeningen er en anden måde at betjene dit høreapparat på. Fordelene ved en Widex RC3-1 fjernbetjening er:

- De større knapper på fjernbetjeningen er nemmere at betjene end de små knapper på høreapparatet.
- Du kan se de knapper, du skal betjene, i modsætning til når du skal justere på dit høreapparat, der sidder i/på øret.
- Du kan på en diskret måde betjene dit høreapparat, fx ved at have fjernbetjeningen i lommen eller i din taske.
- Du kan justere volumen og vælge program på et CIC høreapparat.

RC3-1

Din RC3-1 fjernbetjening er en lille computer, der indeholder data til de forskellige indstillinger af dit høreapparat. Den indeholder også en radiosender, der sender beskeder til høreapparatet. Det er ikke nødvendigt at høreapparatet og fjernbetjeningen kan "se" hinanden. Senderækkevidden er ca. 1 meter.

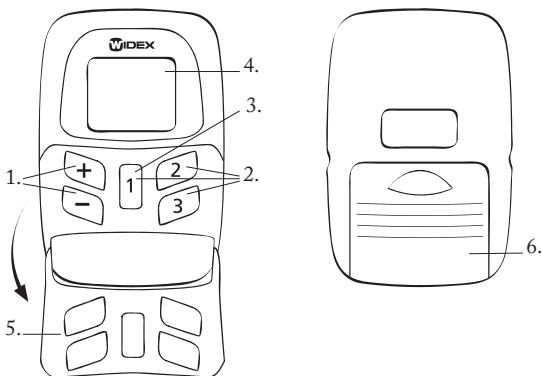

-
1. **Volumenkontrol.** [+] og [-]-tasterne bruges til at justere volumen med.
 2. **Programvælger.** [1], [2] og [3] -tasterne bruges til at vælge program med. Din RC3-1 kan maksimalt have 3 programmer.
 3. **Tænd/sluk funktion.** [1]-tasten bruges til at tænde fjernbetjeningen. [1]-tasten stiller også fjernbetjeningen i udgangsstillingen: P1 V9.
 4. **Display,** der viser programvalg (P for program), lydstyrken (V for volumen) og fjernbetjeningens batteristatus.
 5. **Transparent klap** med hul til tasterne. Klappen kan slås ud, hvilket gør fjernbetjeningen lidt længere, og dermed lidt nemmere at holde på. Ligeledes bliver tasterne lidt højere og nemmere at mærke. Risikoen for at fejlbetjene bliver mindre.
 6. **Batterilåg.**

Batteriinformation

Batteritype

Den anbefalede batteritype til din RC3-1 fjernbetjening er:


Litium CR 2032

Din RC3-1 bruger 2 stk. CR2032 batterier.

Tal med din hørespecialist om anskaffelse af batterier. Bemærk, at der på batteriemballagen findes en datomarkering, som angiver, hvor længe batterierne kan holde og anbefalinger om, hvordan batterierne skal kasseres efter brug. Batteriets holdbarhed er afhængig af, hvor meget du bruger din fjernbetjening.

Isætning af batteriet

Batterierne til din RC3-1 skal lægges i, så siden med plustegnet (+) vender opad.

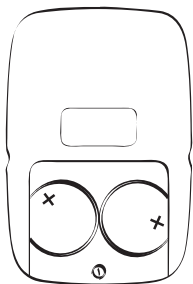

Udskiftning af batteriet


Du skal altid skifte begge batterier. I displayet kan du aflæse fjernbetjeningens batteristatus.



Når batteriet er ved at være brugt op, vil dette symbol stå permanent i displayet. Ved kortere visning af symbolet er det ikke nødvendigt at skifte batterierne.

Tænd og sluk


RC3-1 fjernbetjeningen tændes ved at trykke ca. ½ sek. på [1]-tasten. Som udgangspunkt slukker den automatisk efter 15 sekunder. Du kan sammen med din hørespecialist vælge et andet tidsrum, efter hvilket den skal slukke.

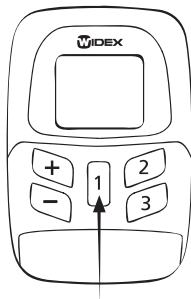

Udgangsstilling

Når din RC3-1 er tændt, kan du stille apparatet i udgangsstillingen P1 V9 ved at trykke på [1]-tasten med et langt tryk på ca. 2 sek.


Lydstyrken

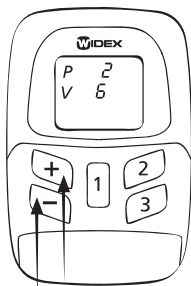

Med [+] [-]-tasterne kan du justere lydstyrken. Lydstyrken kan indstilles i 13 trin. Minimum er 0, som gør apparatet helt tavst, og maksimum er 13. Som udgangspunkt er lydstyrken sat på 9 som standard, og det vil altid være den styrke, fjernbetjeningen vil vende tilbage til. Hvis du fx har valgt lytteprogram 2 på lydstyrken 6, og så skifter til et andet lytteprogram, så vil lydstyrken automatisk starte ved 9 i det nye program.


Når du justerer lyden, kan du vælge at gøre det med enkelte tryk, så du blot springer et trin ad gangen. Eller du kan holde [+] eller [-]-tasten nede, indtil den ønskede lydstyrke er nået.

Indstilling af lydstyrken hvis du kun har ét høreapparat

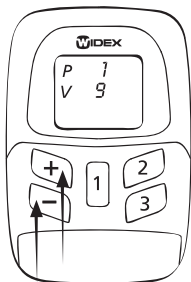

Udgangspunktet er en slukket fjernbetjening, der starter op i program 1 og volumen 9. Tryk på [1]-tasten i ca. ½ sekund. Displayet skal nu vise udgangsstillingen P1 V9. Med [+] [-]-tasterne indstilles lydstyrken til dit behov. Fjernbetjeningen slukker automatisk efter ca. 15 sekunder.

Indstilling af lydstyrken hvis du har to høreapparater

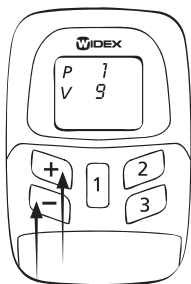


Udgangspunktet er en slukket fjernbetjening, der starter op i program 1 og volumen 9. Tryk på [1]-tasten i ca. ½ sekund. Displayet skal nu vise udgangsstillingen P1 V9. Du kan nu vælge at indstille lydstyrken ved hjælp af [+] [-]-tasterne. Dit valg vil så gælde for begge dine høreapparater. Fjernbetjeningen slukker automatisk efter ca. 15 sekunder.

Lydløs


Du har også mulighed for at bruge din RC3-1 til helt at slukke for lyden i dit høreapparat.

Hvis du kun har ét høreapparat, du ønsker skal være lydløs

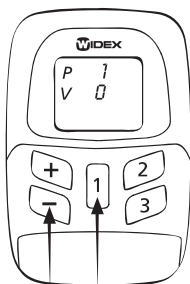


Udgangspunktet er en slukket fjernbetjening, der starter op i program 1 og volumen 9. Tryk på [1]-tasten i ca. ½ sekund. Derefter skal du trykke på [1]-tasten og holde den nede, mens du også trykker på [-]-tasten. Du vil nu i displayet kunne se, at der står 0 ud for V. For at skrue op for lydstyrken igen kan du trykke på [+]-tasten. Det vil sætte lydstyrken tilbage i udgangsstillingen (9).

Hvis du har to høreapparater du ønsker at gøre lydløse

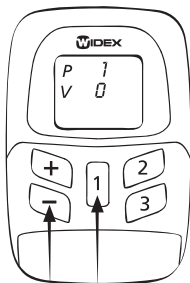

Udgangspunktet er en slukket fjernbetjening, der starter op i program 1 og volumen 9. Tryk på [1]-tasten i ca. ½ sekund. Displayet skal nu vise udgangsstillingen: P1 V9. Derefter skal du trykke på [1]-tasten og holde den nede mens du også trykker på [-]-tasten. Du vil nu i displayet kunne se, at der står 0 ud for V. Det tal gælder for begge høreapparater.

Lytteprogrammerne

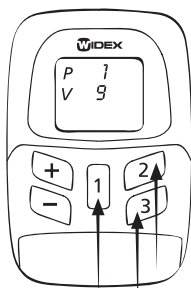

Med din RC3-1 fjernbetjening kan du skifte mellem op til tre lytteprogrammer. Sammen med din hørespecialist har du fundet ud af, hvilke programmer, der er relevante for dig. Hvis dit behov ændrer sig senere, kan valget af lytteprogrammer ændres. Du skifter

mellem lytteprogrammerne ved at trykke på [1], [2] og [3] -tasterne. I displayet kan du se, hvilket program du har valgt. Det bliver vist ud for P (program). Men du kan også høre små bilyde, der angiver hvilket program, du har valgt. Lydene angiver:

Program 1: Én kort bilyd


Program 2: To korte bilyde

Program 3: Tre korte bilyde

Antallet af bilyde afhænger af, hvor mange programmer du sammen med hørespecialisten har valgt at have i dit høreapparat. Sammen med din hørespecialist kan du her angive, hvilke lytteprogrammer du har valgt.


Program	Programnavn i høreapparatet	Kommentarer
1		
2		
3		

Valg af lytteprogram hvis du kun har ét høreapparat

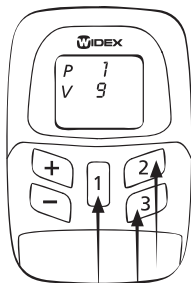

Udgangspunktet er en slukket fjernbetjening, der starter op i program 1 og volumen 9. Tryk på [1]-tasten i ca. ½ sekund. Med [1], [2] og [3]-tasterne vælger du det lytteprogram, du ønsker at lytte til. Fjernbetjeningen slukker automatisk efter ca. 15 sekunder.

Valg af lytteprogram hvis du har to høreapparater

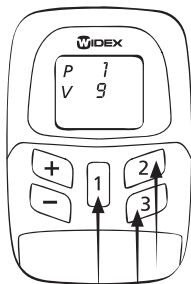

*Udgangspunktet er en slukket fjernbetjening, der starter op i program 1 og volumen 9. Tryk på [1]-tasten i ca. ½ sekund. Med [1], [2] og [3]-tasterne vælger du det lytteprogram, du ønsker at lytte til. Dit valg vil så gælde for **begge** dine høreapparater. Fjernbetjeningen slukker automatisk efter ca. 15 sekunder.*

Vigtigt: Hvis du skifter mellem at bruge din fjernbetjening og knapperne på dit høreapparat når du skal vælge lydstyrke og lytteprogram, skal du være opmærksom på, at fjernbetjeningen kan annullere de justeringer, du foretager manuelt på dit høreapparat.


Et eksempel: Du indstiller lydstyrken eller vælger lytteprogram ved hjælp af fjernbetjeningen. Derefter slukker fjernbetjeningen, og i mellemtiden justerer du lydstyrke og lytteprogram ved hjælp af knapperne på dit høreapparat.

Når du igen tænder for din fjernbetjening, vil den sætte høreapparatet tilbage til den indstilling, det havde inden fjernbetjeningen slukkede, og inden du manuelt ændrede høreapparatindstillingen.

Korttidsanalyse

Vha. RC3-1-fjernbetjeningen kan du optage bestemte, problematiske høresituationer. Tilpasseren kan derefter analysere disse situationer vha. sin software. Optagelsen startes via fjernbetjeningen men foretages via høreapparatet og varer et minut.

Optagelsen sker således:

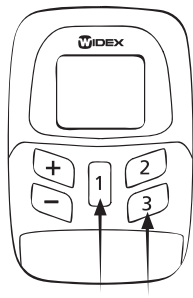




Ved aktiveret eller deaktiveret fjernbetjening: Tryk på den midterste tast [1] på fjernbetjeningen, og hold den nede. Tryk så også på den nederste, højre tast [3].

Nu begynder dit høreapparat at optage de akustiske situationer. I fjernbetjeningens display vises korttidsanalysens resterende tid. Ved fornyet optagelse overspilles den tidligere optagelse.

Vedligeholdelse

Din RC3-1 fjernbetjening vil holde længe, hvis du vedligeholder den rigtigt. Her er et par gode råd, som kan forlænge fjernbetjeningens levetid:

- Du skal behandle din fjernbetjening forsigtigt og omhyggeligt. Når du ikke bruger den, skal du opbevare den på et køligt og tørt sted, hvor børn og kæledyr ikke kan få fat i den.
- Du må ikke udsætte den for kraftig varme eller fugtighed.
- Forsøg aldrig selv at åbne eller reparere din fjernbetjening.
- Fjernbetjeningen rengøres med en blød klud. Du må aldrig bruge vand eller rengøringsmidler.

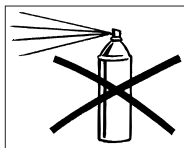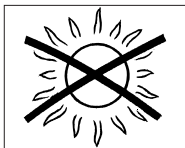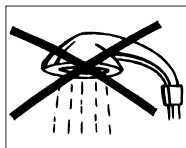

-
- Hvis du skal under strålebehandling (f.eks. kortbølge, røntgen, MR- og CT-scanning osv.), skal du huske at lægge din fjernbetjening fra dig. Nogle former for strålebehandling kan ødelægge fjernbetjeningen. Anbring f.eks. aldrig din fjernbetjening i en mikrobølgeovn. Den stråling, der kan komme fra f.eks. overvågningssystemer, tyverialarmer og mobiltelefoner er svagere og vil ikke skade din fjernbetjening.
 - RC3-1 fjernbetjeningen er ikke godkendt til brug i miner eller andre områder med eksplosive luftarter.

Gode råd

- Du bør være omhyggelig med, at fjernbetjeningen og dens dele ikke er tilgængelige for børn, der kunne putte dem i munden. Hold også batterier uden for børns rækkevidde og kassér de brugte batterier med omhu. Skift ikke batterier for øjnene af børn og lad dem ikke se, hvor du opbevarer dine batterier.
- Put aldrig batterier i munden, da du kan risikere at sluge dem. Er skaden sket, bør du straks kontakte din læge.

Hvis din RC3-1 fjernbetjening ikke virker

Nedenfor finder du nogle gode råd om, hvad du skal gøre, hvis din fjernbetjening ikke virker, som den skal. Du kan selv undersøge følgende, inden du kontakter din hørespecialist.


Hvis din RC3-1 ikke virker, kan det have følgende grunde:

- Der sker ikke noget når du trykker på tasterne. Fold beskyttelsesklappen ud for at få nemmere adgang til tasterne.
- Batterierne ikke sidder ordentlig i. Tag begge batterier ud, sæt dem i igen.
- Batterierne er brugt op. Skift dem.
- Batterierne i dit høreapparat er brugt op. Skift dem.
- Forbindelsen mellem høreapparat/erne og fjernbetjening/en er ustabil. Tænd og sluk for dit/dine høreapparat/er.

Ekstraudstyr

Til din RC3-1 kan du få følgende ekstraudstyr:


- En clip-version af batterilåget
- Etui til fjernbetjeningen
- Bæresnor til clip-versionen af batterilåget

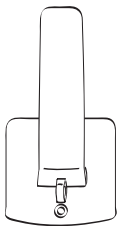

Clip-versionen




Etui

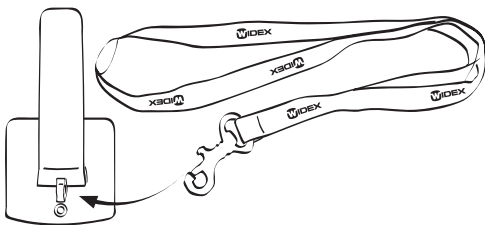

Bæresnor

Clip-versionen har indbygget en bælteclip til at sætte din RC3 fast i bælte eller bukselinning med, og et "øje", hvor du kan fastgøre din RC3-bæresnor, hvis du ønsker at have din RC3 hængende om halsen.

Skift batterilåg

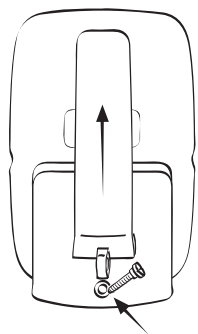

Når du skal skifte batterilåg, skal du også skifte en lille skrue. Under standardbatterilåget sidder der en lille skrue. Den skal fjernes, inden du sætter clip-versionen på. Når du har sat clip-versionen på, skal du skrue den fast med den lange skrue (se illustrationen), der leveres sammen med clip-versionen af batterilåget.

Batterilåget sættes på ved at lægge det som vist på illustrationen. Derefter kan låget nemt skubbes på plads.

Regulatorisk overensstemmelse

Overensstemmelseserklæring

Firma Widex A/S
 Ny Vestergårdsvej 25
 3500 Værløse
 Danmark

erklærer hermed under eneansvar, at
Klasse 2 produkter:

Serie: **RC3**
 Startende med serienummer 10000

Modeller: RC3-1 Fjernbetjening
 RC3-2 Fjernbetjening

er i overensstemmelse med de relevante krav i:

R&TTE Direktiv 1999/5/EC af 9. marts 1999

og følgende standarder:

EN 300 330-2 V1.1.1

EN 301 489-1 V1.4.1 og EN 301 489-3 V1.4.1

EN 60601-1-2:2001

IEC 60601-1-2:2001

Værløse, 02. december 2008

Udstedelsesdato og -sted



Jan Tøpholm

Administrerende direktør

Inden for EU er produktet beregnet til anvendelse i følgende medlemsstater:

AT	BE	BG	CY	CZ
DE	DK	EE	ES	FI
FR	GB	GR	HU	IE
IT	LT	LU	LV	MT
NL	PL	PT	RO	SI
SE	SK			

CE 0459



WIDEX A/S • Nymoellevej 6, DK-3540 Lyngø
Denmark • www.widex.com



Printed by HTO / 2009-01
9 514 0065 010 #02